

Axlab BLADES



Axlab Blades Universal35
 #1993-01



Axlab Blades Solid35
 #1993-02



Axlab Blades Versatile35
 #1993-03



VEJLEDNING FOR BRUG

Axlab Blades er et tilbehør til mikrotom *in vitro*-enheden. Axlab Blades er mikrotom-blade til engangsbrug i laboratoriet beregnet til at skære formalinfikserede paraffinindlejrede (FFPE) eller frosne vævsblokke. Plasmabelægningen forstærker bladenes skarphed og holdbarhed. Axlab Blades er til engangsbrug og bør ikke genbruges.

TILSIGTET FORMÅL


Axlab Blades er mikrotom-blade til laboratorier, der er beregnet til at skære formalinfikseret paraffinindlejret (FFPE) eller frosset væv til efterfølgende mikroskopiske undersøgelser.

BRUG AF BLADENE

- 1) Udskub et enkelt (1) Axlab-blad fra dispenserens manuelt, eller brug den sikredskubningsholder til blade på mikrotomen. Hvis mikrotomen ikke har en udskubningsholder, skal du håndtere bladet med største forsigtighed.
- 2) Sørg for, at Axlab-bladet er monteret korrekt for at garantere sikker og korrekt drift for mikrotomen.
Bemærk: Brug den skarpe kant til at skære i vævsblokken. Brug pilen på bladet til at sikre retningen. Trekanten peger på den skarpe kant.



- 3) Udskift Axlab-bladet, når det viser tegn på slitage.
- 4) Brug en pincet til at fjerne bladet, hvis du ikke kan støtte fjernelse af bladet med dispenserens.

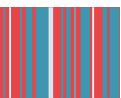

BRUGSMILJØ

Axlab Blades fungerer som tilbehør til medicinsk udstyr til *in vitro*-diagnostik, der er beregnet til brug i laboratiemiljøer.

Axlab Blades er til engangsbrug og bør ikke genbruges.

TILSIGTEDE BRUGERE

Bladene er beregnet til laboratoriebrug og bør kun håndteres af uddannet personale.

INDHOLD

Axlab Blades leveres i en kasse med 10 indvendige æsker. Hver inderboks indeholder en plastdispenser med 50 blade. Når du modtager Axlab-bladene, skal du sikre dig, at leveringen er komplet, og at der ikke er nogen skader på indholdet.

Fjeder, bladskubber og bladudskubningsholder til mikrotomen skal være intakte.

OPBEVARING



Axlab Blades skal beskyttes mod hårdhændet håndtering eller mekaniske stød og opbevares på et tørt, godt ventileret sted væk fra direkte sollys. Den anbefalede opbevaringstemperatur er mellem -10 °C og +50 °C.

UDLØBSDATO

Holdbarheden for Axlab-blade er to (2) år fra fremstillingsdatoen.

ADVARSLER



Axlab-bladene er ekstremt skarpe. Vær forsigtig ved håndtering. Når du fjerner bladet fra dispenseren, skal du være meget opmærksom på æggen og sørge for ikke at røre ved den.

BORTSKAFFELSE

Når du har brugt bladet, skal du sætte det brugte blad ind i dispenserens rum. Alternativt kan du bortskaffe bladet i en særlig skraldespand til skarpe genstande. Axlab Blades skal bortskaffes som medicinsk affald for at forhindre kontaminering. Bortskaffelse skal ske i henhold til gældende love, regler og standarder i det land, hvor bladene anvendes.

HÆNDELSER

I tilfælde af en alvorlig hændelse bedes du rapportere direkte til producenten af dette medicinske udstyr hos Axlab på axlab.dk og til den nationale kompetente myndighed.