

Axlabs BLADES



Axlabs Blades Universal35
#1993-01



Axlabs Blades Solid35
#1993-02



Axlabs Blades Versatile35
#1993-03



GEBRUIKSAANWIJZING

Axlabs Blades zijn een accessoire voor het *in vitro* microtoomapparaat. Axlabs Blades zijn wegwerpbare laboratoriummicrotoommessen bedoeld voor het snijden van in formaline gefixeerde, in paraffine ingebedde (FFPE) of bevroren weefselblokken. De plasma-coating versterkt de scherpte en duurzaamheid. Axlabs Blades zijn bestemd voor eenmalig gebruik en mogen niet hergebruikt worden.

BEOOGD DOEL

Axlabs Blades zijn laboratoriummicrotoommessen die bedoeld zijn voor het snijden van in formaline gefixeerd en in paraffine ingebed (FFPE) of bevroren weefsel voor daaropvolgend microscopisch onderzoek.

DE MESJES GEBRUIKEN

- 1) Werp handmatig één (1) Axlabs Blade uit de dispenser of gebruik de veilige mes-uitwerphouder op de microtoom. Als de microtoom niet over een uitwerphouder beschikt, dient u het mesje met de grootste voorzichtigheid te behandelen.
- 2) Zorg ervoor dat het Axlabs Blade correct is geïnstalleerd om een veilige en correcte werking te garanderen van de microtoom.
Opmerking: Gebruik de scherpe kant om het blok weefsel te snijden. Gebruik de pijl op het mesje om de juiste richting te bepalen. De driehoek wijst naar de scherpe rand.



- 3) Vervang het Axlabs Blade wanneer het mesje tekenen van slijtage vertoont.
- 4) Gebruik een pincet om het mesje te verwijderen als u het verwijderen van het mesje niet kunt ondersteunen met de mesdispenser.

GEBRUIKSOMGEVING

Axlab Blades fungeren als accessoire bij een *in vitro* diagnostisch medisch hulpmiddel dat bedoeld is voor gebruik in laboratoria. Axlab Blades zijn bestemd voor eenmalig gebruik en mogen niet hergebruikt worden.

BEOOGDE GEBRUIKERS

De mesjes zijn bedoeld voor gebruik in laboratoria en mogen alleen door getraind personeel worden gehanteerd.

INHOUD

Axlab Blades worden geleverd in een doos met 10 binnendoosjes. Elk binnendoosje bevat een plastic dispenser met 50 mesjes. Bij ontvangst van de Axlab Blades controleer dat de levering compleet is en de inhoud niet beschadigd is. De veer, de bladduwer en de uitwerphouder voor de microtoom moeten intact zijn.

OPSLAG



Axlab Blades moeten worden beschermd tegen ruwe behandeling of mechanische schokken en moeten worden opgeslagen op een droge, goed geventileerde plaats, uit de buurt van direct zonlicht. De aanbevolen opslagtemperatuur ligt tussen -10°C en +50°C.

VERVALDATUM

De houdbaarheid van Axlab Blades bedraagt twee (2) jaar vanaf de productiedatum.

WAARSCHUWINGEN



Axlab Blades zijn extreem scherp. Wees voorzichtig bij het hanteren. Wanneer u het mesje verwijdert uit de dispenser, let dan goed op de rand en raak het niet aan.

AFVOER

Plaats na gebruik het gebruikte mesje in het daarvoor bestemde vakje van de dispenser. U kunt het mesje ook weggooien in een specifieke bak voor scherpe voorwerpen. Axlab Blades moeten worden afgevoerd als medisch afval om besmetting te voorkomen. Bij het afvoeren van de mesjes dient u zich te houden aan de geldende wetten, regels en normen van het land waar de mesjes worden gebruikt.

INCIDENTEN

Indien er zich een ernstig incident voordoet, meld dit dan rechtstreeks bij de fabrikant van dit medische hulpmiddel via Axlab at axlab.dk en bij de bevoegde nationale instantie