

Axlabs BLADES



Axlabs Blades Universal35
#1993-01



Axlabs Blades Solid35
#1993-02



Axlabs Blades Versatile35
#1993-03



GEBRUIKSAANWIJZING

De Axlabs-mesjes zijn een accessoire voor het microtoom *in vitro*-apparaat. De Axlabs-mesjes zijn wegwerp-laboratorium-microtoommesjes, bedoeld voor het snijden van formaline gefixeerde paraffine ingebedde (FFPE) of bevroren weefselblokken. De plasmacoating versterkt hun scherpte en duurzaamheid.

De Axlabs-mesjes zijn voor eenmalig gebruik en mogen niet worden hergebruikt.

BEOOGD DOEL

De Axlabs Blades zijn microtoommesjes voor laboratoriumgebruik, bedoeld voor het snijden van formaline gefixeerd paraffine ingebed (FFPE) of bevroren weefsel voor daaropvolgend microscopisch onderzoek.

GEBRUIK

- 1) Neem één (1) Axlabs-mesje handmatig uit de dispenser of gebruik de veilige mesjesuitwerphouder op het microtoom. Als het microtoom geen uitwerphouder heeft, ga dan uiterst voorzichtig om met het mesje.
- 2) Zorg ervoor dat het Axlabs-mesje correct is geïnstalleerd om een veilige en goede werking van het microtoom te garanderen.
Let op: Gebruik de scherpe rand om het weefselblok te snijden. Gebruik de pijl op het mesje om de oriëntatie vast te zetten. De driehoek wijst naar de scherpe rand.



- 3) Vervang het Axlabs-mesje als het tekenen van slijtage vertoont.
- 4) Gebruik een pincet om het mesje te verwijderen als het verwijderen van het mesje met de dispenser niet mogelijk is.

GEBRUIKSOMGEVING

De Axlab-mesjes functioneren als accessoire voor een medisch apparaat voor *in-vitrodiagnostiek* dat bedoeld is voor gebruik in laboratoriumomgevingen.

De Axlab-mesjes zijn voor eenmalig gebruik en mogen niet worden hergebruikt.

BEOOGDE GEBRUIKERS

De mesjes zijn bedoeld voor laboratoriumgebruik en mogen alleen door getraind personeel gehanteerd worden.

INHOUD

De Axlab-mesjes worden geleverd in een doos met 10 binnendozen. Elke binnendoos bevat een plastic dispenser met 50 mesjes. Controleer na ontvangst van de Axlab-mesjes of de levering compleet is en de inhoud niet beschadigd is. De veer, mesjesduwer en de uitwerphouder voor het microtoom moeten intact zijn.

OPSLAG



Axlab Blades moeten worden beschermd tegen ruwe behandeling of mechanische schokken en moeten worden opgeslagen in een droge, goed geventileerde ruimte, uit direct zonlicht. De aanbevolen opslagtemperatuur ligt tussen -10°C en +50°C.

VERVALDATUM

De Axlab-mesjes zijn twee (2) jaar houdbaar vanaf de productiedatum.

WAARSCHUWINGEN



De Axlab-mesjes zijn extreem scherp. Wees voorzichtig bij het hanteren. Wanneer u een mesje de dispenser neemt, let dan goed op de rand en zorg ervoor dat u deze niet aanraakt.

VERWIJDERING

Plaats het gebruikte mesje na gebruik in het vakje van de dispenser. Als alternatief kunt u het mesje in een speciale bak voor scherpe voorwerpen werpen. De Axlab-mesjes moeten worden afgevoerd als medisch afval om besmetting te voorkomen. Verwijdering moet gebeuren volgens de geldende wetten, voorschriften en normen van het land waar de mesjes worden gebruikt.

INCIDENTEN

In geval van een ernstig incident rapporteert u dit rechtstreeks aan de fabrikant van dit medische hulpmiddel op Axlab via axlab.dk en aan de nationale bevoegde autoriteit.