

Axlab OBJECT SLIDES

Axlab Object Slides, Non-Coated #1993-10

Axlab Object Slides, Coated #1993-11



BRUKSANVISNING

Object Slides er viktig tilbehør for mikroskopisk evaluering og *in vitro*-analyse. De brukes ofte i klinisk diagnostikk til ulike formål og bruksområder, blant annet FFPE-prøver, rensede prøver, fargede celler og blodprøver.

Prøven plasseres forsiktig ned på objektglasset og føres gjennom fargeprosessen trinn for trinn, helt til den er klar for patologisk analyse. Dette gir en detaljert oversikt over form og struktur.

Object Slides er forhåndsrenset og finnes i både ikke-belagte og hydrofilbelagte alternativer. De hydrofilbelagte objektglassene gir bedre adhesjon, noe som sikrer at prøvene sitter godt fast under farging. En slik adhesjon er avgjørende for å bevare prøvens integritet og oppnå nøyaktig farging, noe som er avgjørende for å identifisere spesifikke biomarkører og vev i forbindelse med diagnostisering.

TILTENKT FORMÅL

Object Slides er beregnet på å støtte og hente ut prøver, blant annet celler eller vev, til evaluering med mikroskop.

BRUK AV OBJEKTGLASSENE

- 1) Sørg for at objektglasset er fritt for støv, fingeravtrykk, fett og andre kontaminerende kilder.
- 2) Prøven som skal undersøkes, plasseres helt på midten av objektglasset.
Merk: Samme side som det mattslipte området.
- 3) Farging av prøven utføres etter behov.
- 4) Valgfritt: Hold et dekkglass i en vinkel på 45° og senk det sakte ned for å unngå luftbobler.
- 5) Fest objektglasset på mikroskopet med objektbordklips.
- 6) Start den mikroskopiske undersøkelsesprosessen.

MILJØ FOR BRUK

Object Slides fungerer som tilbehør til medisinsk utstyr for *in vitro*-diagnostikk beregnet på bruk i laboratoriemiljøer.

Objektglassene er til engangsbruk og skal ikke benyttes flere ganger.

TILTENKTE BRUKERE

Object Slides er beregnet for laboratoriebruk og skal kun håndteres av personell med relevant opplæring.

INNHold

Objektglassene leveres i en produktboks som inneholder 100 objektglass.

Når du mottar Object Slides, må du forsikre deg om at leveransen er fullstendig og at innholdet ikke er skadet.

OPPBEVARING



Object Slides skal ikke håndteres på brutalt eller uforsvarlig vis og ikke utsettes for mekaniske støt. Det skal oppbevares på et tørt, godt ventilert sted, unna direkte sollys.

Under oppbevaring og innpakking må sluttproduktet oppbevares på en måte som minimerer risikoen for støv, luftbårne partikler og kilder til kontaminasjon.

Objektglassene skal oppbevares i en temperatur på under 30 °C på et tørt, godt ventilert sted, unna sollys og med en luftfuktighet på maks. 75 %.

UTLØPSDATO

Se etiketten på Object Slides.

HOLDBARHET

Object Slides produseres med en holdbarhet på:

To(2) år for Axlab Object Slides Non-Coated (1993-10).

Ett(1) år for Axlab Object Slides Coated (1993-11).

SPESIFIKASJONER

Lengde: 76,0 mm ± 0,3 mm

Bredde: 26,0 mm ± 0,3 mm

Tykkelse: 1,00 mm ± 0,05 mm

Axlab Objektglass er kompatible med vanlige objektglassholdere for mikroskop.

ADVARSLER



Hvis objektglasset knuses, er glasset ekstremt skarpt. Må håndteres med varsomhet.

AVHENDING

Avhending skal skje i samsvar med gjeldende lover og, i henhold til god laboratoriepraksis, regler og forskrifter i det landet der objektglassene brukes. Etter bruk skal objektglassene avhendes som medisinsk avfall.

UHELL

Alvorlige uhell må rapporteres direkte til produsenten av dette medisinske utstyret på axlab.dk, samt til kompetente myndigheter i det aktuelle landet.